

2012 장애인 보조기구

<자세보조용구>

등록 업소 및 품목 안내



2012. 11

업소 및 품목 요약

1. 유진헬스케어 / 3 품목
2. 이지무브 / 2 품목
3. 포트 / 2 품목
4. 삼마메디칼 / 2 품목
5. 위드알앤에이 / 2 품목
6. 태산솔루션즈 / 1 품목
7. 미음드레 / 1 품목
8. 리컴메디칼 / 1 품목
9. 오토복코리아 / 1 품목



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 02 - 2236 - 6966 [서울 성동구 성수동2가 275-28]
2. E-mail : eugenehc@ecount.co.kr

품목 정보

품목 1.

1. 품목 명 : Eugene Modular Seating System (EMSS)
2. 품목 타입 : 모듈형

제품사양

1. 제품 규격 :
▶ Size 1, Size 2, Size 3
2. 중 량 :
▶ 5.5Kg ~ 6.5Kg
3. 재 질 :
▶ 합성 피혁, 이너용 스펀지, 철제 프레임, 합판, PVC 등.
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)
▶ 1. 회사의 제품 하자에 대한 무상A/S 보증기간은 1년(단, 1년 이내라도 사용자 과실로 인한 파손은 유상수리)이며, 출장비는 따로 청구할 수 있다. 1년이 초과한 제품에 대해서는 유상수리 비용이 청구된다.
▶ 2. 1년 미만의 A/S 중 소비자의 성장이나 자세변환의 목적으로 제품의 재제작이나 해체조립은 유상으로 한다.



*휠체어 별도 구매

품목 정보

<유진>

제품 설명

모듈형 이너의 대상자

- 머리와 체간을 가눌 수 있는 사용자
- 척추와 골반의 변형이 심하지 않은 장애인
- 체간과 골반의 자세가 유연한 장애인

모듈형 이너의 특징점

- 장애아동의 자세유지 및 변형 예방 목적
- 성장에 따라 가슴지지대, 골반벨트 등을 조절하며 사용가능
- 분리 착탈 가능
- 사용자의 상태와 요구에 맞춰 다양한 옵션을 활용하여 자세 유지 및 교정 가능
- 수동휠체어, 전동휠체어, 나무의자, 유모차, 카시트 등 다양한 Frame에 장착 가능



환자의 머리를 지지하고 높이와
깊이가 조절가능 한 머리받침



체간과 골반을 지지하고
높이와 깊이 조절, 착탈이 가능
한 가슴지지대와 골반지지대



다양한 옵션 적용이
가능한 등판과 좌판

CUSHION COLOR



Eugene Modular Seating System (EMSS)의 구성

기본 구성

V형머리받침, 블럭형등좌판, 팔받침, 가슴지지대, 골반지지대, 발받침

추가 옵션

- 등좌판 - Contour형
- 두정부 - Contour형, Butterfly형
- 상 지 - 팔꿈치패드, 세로그림, 가로그림
- 체 간 - 어깨패드, 조절형가슴받침, 요추패드, 책상
- 하 지 - 내전방지패드, 외전방지지지대, 무릎패드, 하퇴유지패드
- 벨 트 - 손목벨트, 어깨벨트, 가슴벨트, 체간벨트, 골반벨트, 가랑이벨트, 대퇴벨트, 무릎벨트, 하퇴벨트, 발목벨트

품목 2.

1. 품목 명 : 수작업 이너
2. 품목 타입 : 물당형

제품사양

1. 제품 규격 :
▶ 생후 36개월 유아로부터 성인까지 체형에 맞추어 제작하는 맞춤형 착석 시스템.
2. 중 량 :
▶ 6.5Kg ~ 7Kg
3. 재 질 :
▶ 합성 피혁, 이너용 스펀지, 합판 등
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)
▶ 1. 회사의 제품 하자에 대한 무상A/S 보장기간은 1년(단, 1년 이내라도 사용자 과실로 인한 파손은 유상수리)이며, 출장비는 따로 청구할 수 있다. 1년이 초과한 제품에 대해서는 유상수리 비용이 청구된다.
2. 1년 미만의 A/S 중 소비자의 성장이나 자세변환의 목적으로 제품의 재제작이나 해체조립은 유상으로 한다.



제품 설명

1. 수작업 이너의 용도

- 누워서 생활하는 장애인이나 척추변형 등으로 인해 정상적인 착석이 어려운 경우 자세를 유지시켜 착석이 가능하도록 도와줌
- 신체의 불규칙한 발달, 변형을 예방 및 교정
- 이동성 확보

2. 수작업 이너의 대상자

- 뇌성마비, 근육병, 근디스트로피 환자, 척추마비 장애인, 강직 및 경직으로 착석이 어려운 장애인, 척추의 변형이 진행 중인 장애인, 희귀 난치질환자 등 앉기 자세가 필요한 장애인

3. 수작업 이너의 특징점

- 사용자의 몸에 맞추어 틀을 깎아서 만드는 전통적인 제작 방식의 Inner (1999년부터 현재까지 다년간의 제작 기술 보유)
- 상단, 측정 후 기본틀을 제작하고 자세를 교정하며 몸에 맞추어 깎아 제작
- 편안하고 안정적인 자세유지, 변형 예방, 앉은 자세 교정 목적
- 경중에서 중중 장애인 모두에 적용
- 수동휠체어, 전동휠체어, 나무의자, 유모차, 카시트 등 용도와 기능에 맞게 맞춤 제작 가능

제품 설명



수작업 이너 제작 과정

상담 및 취형(방문) > 치수에 맞게 틀 제작(공장) > 가봉 및 환자의 몸에 맞게 틀 깎기 (방문) > 틀 가공과 외피 제작 및 frame에 조립(공장) > 납품(방문)

이너의 적용 사례



목재의자



수동 W/C



전동 W/C



카시트



유모차

품목 3.

1. 품목 명 : 체형복제 이너
2. 품목 타입 : 몰딩형

제품사양

1. 제품 규격 :
▶ 생후 36개월 유아로부터 성인까지 체형에 맞추어 제작하는 맞춤형 착석 시스템.
2. 중 량 :
▶ 6.5Kg ~ 7Kg
3. 재 질 :
▶ 합성 피혁, 폴리우레탄폼, 이너용 스펀지, 합판 등
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)
▶ 1. 회사의 제품 하자에 대한 무상A/S 보장기간은 1년(단, 1년 이내라도 사용자 과실로 인한 파손은 유상수리)이며, 불량비는 따로 청구할 수 있다. 1년이 초과한 제품에 대해서는 유상수리 비용이 청구된다.
2. 1년 미만의 A/S 중 소비자의 성장이나 자세변환의 목적으로 제품의 재제작이나 해체조립은 유상으로 한다.



제품 설명

체형복제이너의 특징점

맞춤 Inner를 제작하기 위해 인체의 모형을 몰딩하는 시스템으로 시술자의 감각으로 등/좌판을 깎아 만든 것을 2회의 폴리우레탄 시스템을 활용하여 환자의 체형을 완벽히 복제하는 Inner 제작방식


★특징

- 가. 국내 유일의 임상 및 연구 논문 보유 : Attenuation of spinal Curvature and Pelvic Obliquity by Body Shape Molded Inner System in Cerebral Palsy with Non-Fixed Scoliosis. (2011)
- 나. 검증된 제작방식의 완벽한 체형복제 (신촌세브란스병원 임상)
- 다. 자체 개발한 시뮬레이터를 이용한 자세교정 시뮬레이션(포지셔닝)으로 의학적 목표(자세 교정)를 정확히 구현
- 라. 성장 시 리폼 가능
- 마. **국내와 미국, 일본, 대만, 중국 특허 등록**
(국내 특허 등록번호 : 제 10-0750299 호) (미국 특허 등록번호 : US 7,906,050 B2) (일본 특허 등록번호 : 4477015호)
(대만 특허 등록번호 : I 358287호) (중국 특허 등록번호 : ZL 2007 8 0005275.2)

제품 설명



체형복제 이너 제작과정

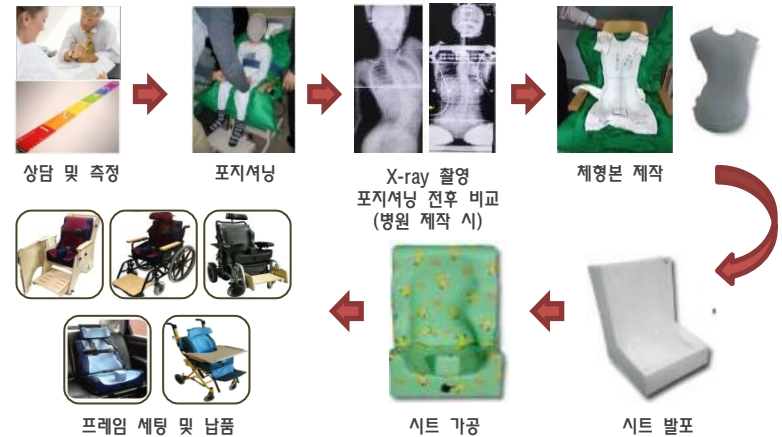

수동휠체어, 전동휠체어, 나무의자, 유모차, 카시트 등
용도와 기능에 맞게 맞춤 제작 가능

협약업소 정보

번호	업소명	주소	연락처
1	그린메디칼	서울시 은평구 역촌동	02-354-6966
2	성림교역	서울시 영등포구 영등포로	02-2068-8191
3	아이미르	서울시 송파구 가락동	02-404-8322
4	(주)코지라이프 서울	서울시 송파구 문정동	1544-8972
5	케어라이프코리아	서울시 광진구 광장동	02-455-0858
6	동부케어 안양노인복지센터	경기도 안양시 동안구	031-426-1090
7	동부케어의료기	경기도 화성시 진안동	010-8623-7661
8	(주)코지라이프	경기도 성남시 중원구 중원동	1544-8972
9	미래엠텍	강원도 원주시 명륜2동	033-764-6587
10	(주)휴먼케어	충청북도 청원군 오창읍 창리	043-212-9194
11	(주)포트	대구 수성구 수성로	053-768-8397
12	청호헬스케어	대구시 달서구 성당동	053-584-4431
13	신승의료기	광주광역시 서구 쌍촌로	062-362-5579
14	우리아웃징엔지니어링생활센터	광주광역시 북구 오치동	062-264-3157
15	전남메디텍	광주광역시 동구 석석동	062-232-6949
16	(주)티렉스	광주광역시 서구 광천동	062-655-5081
17	보석의료기	전라남도 광양시 광야읍	061-763-6633
18	보석의료기	전라남도 순천시 해룡면	061-723-4743
19	새한의료기	전라북도 관례시 신흥동	063-546-0100
20	이강아재활사	전라북도 전주시 덕진구 금암동	063-286-0122
21	웰플러스스디솔	경상남도 김해시 회동	055-336-4743
22	삼성메디	경상남도 김해시 삼정동	055-326-0969
23	(주)코지라이프 경남	경상남도 김해시 삼정동	070-4406-2630
24	(주)클리어뷰코리아	경상남도 김해시 함박로	055-336-4743
25	실버전사	부산광역시 사하구 괴정동	051-291-2810
26	(주)코지라이프 부산	부산광역시 연제구 연산5동	051-866-2630
27	큰사랑 홈케어	부산광역시 사상구 모락동	051-314-7175
28	누가의료기	울산시 동구 전학동	052-201-9949
29	신제주노인방문요양센터	제주 제주시 노형동	070-8819-9229



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 031-689-3100 [경기 안양시 만안구 안양 7동 196-43]
2. E-mail : info@easymove.co.kr

품목 정보

품목 1.

1. 품목 명 :EMI-100-이너(inner)
2. 품목 타입 : 물당형

제품사양

1. 제품 규격 : 등판 -가로[390]mm*세로[160]mm*높이[410]mm (헤드 레스트 포함 440~610)
좌판 -가로[400]mm*세로[300]mm*높이[140]mm
<개인 맞춤형 Inner로 규격은 유동성 있게 적용합니다.>
2. 중 량 : 맞춤형 Inner로 제작품마다 중량은 유동성 있게 적용합니다.
3. 재 질 : Inner 폼(우레탄), 마감원단(레저)
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)




제품 설명

1. 개인 맞춤형 시트로서 1차 피팅(fitting) 이후 가공 전 2차 최종 피팅을 통해 대상자의 신체사이즈에 완벽하게 맞추어 앉기가 힘들어 누워서 생활해야 하는 아동들에게 앉은 자세를 바로 잡아주거나 지지력을 제공해주어 자세변형의 진행을 막아주고 자세변형의 통하여 발생할 수 있는 합병증을 예방할 수 있습니다.
2. 대상자의 체형에 맞게 가슴 벨트 및 골반 벨트의 길이를 조절할 수 있습니다.
3. 필체어 등 의자에 삽입하여 사용합니다.
4. 대상자가 미끄러지거나 하지의 내전을 막기위해 폼뿔을 장착하여 사용할 수 있습니다.
5. 제품구성 : 등판, 좌판, 헤드레스트, 자세유지 고정 벨트 및 쿠션, 폼뿔
6. 사용방법
 - 1) 헤드레스트 (조절나사를 풀어서 조절)




<길이조절 상하170mm>

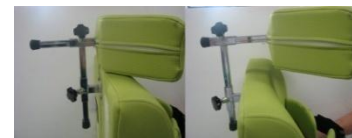

<길이조절 전후100mm>

2) 체형맞춤패드

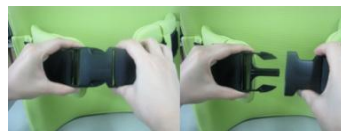

<가슴벨트 버클사용>



<가슴벨트 길이조절>




<골반벨트 버클사용>



<골반벨트 길이조절>

3) 시트 분리가능

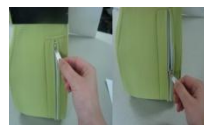

<등판>



<좌판>

4) 폼뿔 사용



품목 2.

1. 품목 명 : carrot III
2. 품목 타입 : 모듈형

제품사양

1. 제품 규격 : 전제너비[420]mm*좌판깊이[250-410]mm*등판길이[520-645]mm
좌판폭[260]mm,
2. 중량 : 8.7kg(기본형)
10.5kg(어깨보호날개 장착시), 허용중량(15-49kg)
3. 재질 : 면(OXYmat)
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)



제품 설명

1. 장애아동용 카시트로선 국내최초로 안전인증을 획득한 제품이며, 유럽, 북미, 일본 등에서도 안정성을 인정받은 제품입니다.
2. 장애아동의 안전하고 편안한 차량이용을 위하여 개발된 카시트입니다.
3. 아동의 신체 특성에 맞게 머리받침, 등받침, 가슴패드의 높이를 조절할 수 있습니다.
4. 시트의 깊이를 조절할 수 있어 더욱 안전합니다.
5. 성장기의 아동도 옵션 파트의 장착만으로도 길이를 늘릴 수 있어 2세에서 13세까지 사용 가능합니다.
6. 어느 부위든 손쉽게 탈부착 가능한 벨크로식 패드(머리, 가슴, 골반패드, 시트패드)로 자세 조절에 도움을 줍니다.
7. 측면 충격에 대비한 어깨 보호패드가 장착되어 있습니다.
8. 커버를 손쉽게 벗길 수 있어 세탁 및 유지보수가 용이합니다.

제품 설명

1. 제품구조



2. 옵션사항

- 좌판, 등판 연장패드(50,100mm), 테이블, 삼각웨지, 어깨보호날개(어깨패드)



제품 설명

3. 악세서리 제공

다음의 패드와 쿠션은 Carrot III 구매 시 기본으로 제공되는 악세서리입니다. 각각의 패드와 쿠션은 벨크로로 처리되어 있어 사용 아동 신체 특성에 따라 원하는 위치에 쉽게 고정시킬 수 있습니다.

1) 머리받침 패드

-사용 아동의 머리를 편안하고 안전하게 지지해주는 패드로 헤드레스트 안쪽에 장착되어 있습니다.

2) 바디 발란스 패드

-시트 착석 시 아동이 편안함을 느낄 수 있도록 몸의 균형을 잡아주는 체간 패드입니다.

3) 시트 발란스 패드

-시트 착석 시 아동이 편안함을 느낄 수 있도록 몸의 균형을 잡아주는 골반 패드입니다.

4) 콤포트 쿠션

-시트 착석 시 골반이 앞쪽으로 미끄러지지 않도록 도와줍니다.



4. 색상

- 고급스러운 패브릭과 잘 어우러진 산뜻하고 활기 넘치는 색감으로 아이들이 선호하는 색채를 적용하였습니다



■ 카민 레드



■ 네이비 블랙



■ 코발트 블루

협약업소 정보

번호	업소명	주소	연락처
1	대명비엔앰	서울특별시 동작구 사당5동 224-24	02-597-8251
2	종로의료기	서울특별시 도봉구 쌍문동 80-49	02-905-8024
3	코지라이프	서울특별시 송파구 중민로66 가든파이버라이프 L-8007	02-408-4040
4	동부케어(안양)	경기도 안양시 동안구 평촌동 87-3번지 2층	031-426-1090
5	동부케어(군포)	경기도 군포시 금정동 710-6	031-427-9915
6	동부케어(화성)	경기도 화성시 진안동 514-2 5층	1577-7650
7	코지라이프(성남)	경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 202호	1544-8972
8	삼마메디칼	경기도 남양주시 와부읍 월문리 1287	031-576-0373
9	청호헬스케어	대구광역시 달서구 성담동 74-6	053-584-4431
10	코지라이프(경남)	경남 김해시 삼정동 640-12	070-4406-2630
11	삼성메디	경남 김해시 인제로39번길 20 1층(삼정동)	055-326-0969
11	웰플러스다솔	경남 김해시 내외동 1207번지 8호	055-336-4743
11	동부케어 노인용품점	전남 광양시 중동 1827-14	070-4109-1463
12	실버천사	부산광역시 사하구 괴정동 306-1	051-291-2810
13	코지라이프(부산)	부산광역시 연제구 연산5동 1342-28	051-866-2630
14	큰사랑홈케어	부산광역시 사상구 모라제1동 955-1 2층	051-314-7175
15	신제주노인 방문요양센터	제주특별자치도 제주시 노형동 1433-5	064-747-3377



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 1566-8397(053-768-8397) [대구 수성구 상동 497-7]
2. E-mail : help@fort.or.kr

품목 정보

품목 1.

1. 품목 명 : RT 이너(INNER)
2. 품목 타입 : 물당형

제품사양

1. 제품 규격 : 맞춤 규격
2. 중 량 : 약 5kg
(구성에 따라 차이 남)
3. 재 질 : HR40, HR25, 해면 스펀지, 일반 스펀지, 유연성레자
4. 보증 기간 : 무상1년 (유상2년)

	시트 (W * D * H)	등받이 (W * D * H)
소	300 * 330 * 60	300 * 45 * 320
중	360 * 440 * 60	360 * 45 * 420
대	400 * 460 * 60	400 * 45 * 520



품목 정보

제품 설명

RT 이너는?

객관적이고 과학적인 신체평가도구를 이용해 사용자의 기능적 자세를 평가한 후, 압력분산에 원리에 의한 편안함과 '3점압 위치측정' 원리를 이용한 기능적 자세 유지를 동시에 만족할 수 있도록 전문가가 직접 참여하여 사용자의 일상생활 동작에 가장 효율적인 이너 형태로 설계된 기능성 물당형 이너입니다.

(주)포트는 인체에 유해한 마블스폰지를 사용하여 이너를 제작하지 않습니다.



기타 발/팔 받침대 및 각종 스트랩(벨트)는 장애유형에 따라 적용여부를 결정함

2. 기능

- 편안함 제공 : 충분한 지지력을 제공하여 앉은 자세에 있어 안락하고 편안함 제공
- 욕창방지 : 돌출된 뼈 위의 조직파열을 예방하고 압력을 분산하여 욕창을 예방
- 기능적 자세유지 : 신체의 올바른 정렬을 유도하여 효율적으로 팔을 사용할 수 있게 하며 환경과의 상호작용을 가능하게 하고 구축과 변형을 예방
- 삶의 질 향상 : 기능적인 자세를 유지하여 신변처리, 일상생활, 작업, 학습, 여가활동 등을 용이하게 하여 사용자의 전반적 삶의 질 향상
- 대사활동 증진 : 올바르게 신체를 지지하여 호흡, 소화, 혈액순환 등 대사활동 증진

품목 2.

1. 품목 명 : RT 모듈러 이너
2. 품목 타입 : 모듈형

제품사양

1. 제품 규격 : 맞춤 규격

	시트 (W * D * H)	등받이 (W * D * H)
소	300 * 330 * 60	240 * 45 * 320
중	360 * 440 * 60	300 * 45 * 420
대	400 * 460 * 60	340 * 45 * 520

2. 중 량 : 약 5kg
(구성에 따라 차이 남)

3. 재 질 : 알루미늄(6,7계열), Sus, ABS, HR40, HR25, 해면 스펀지, 일반 스펀지, 루버텍스, 유연성레자

4. 보증 기간 : 무상1년 (유상2년)



제품 설명

RT 모듈러 이너는?

2011년 보건복지부 ‘국립재활원’ R&D 사업을 통해 국내에서는 처음 개발되어 판매되는 선진국형 Seating System으로 인체에 맞게 각 부품과 부속 형태를 선택, 조절하여 사용할 수 있기 때문에 기존 몰딩형 타입의 이너와는 달리 사용자의 성장이나 자세변화에 따라 맞춤형식의 개조가 가능하여 기능성, 사용성, 경제성 측면에서 매우 효율적입니다.



제품 설명

1. 기능

- 1) 편안함 제공 : 충분한 지지력을 제공하여 앉은 자세에 있어 안락하고 편안함 제공
- 2) 압력경감 : 등받이 및 좌석의 국소부위 압력을 분산하여 욕창 예방
- 3) 신체지지 : 신체의 올바른 정렬을 유도하여 효율적으로 팔을 사용할 수 있게 하며, 환경과의 상호 작용을 가능하게 해주고 관절부위의 구축과 변형을 예방
- 4) 기능적 능력 개선 : 기능적인 자세를 유지하여 신변처리, 일상생활, 작업, 학습, 여가 활동을 용이하게 하여 사용자의 전반적 삶의 질 향상
- 5) 대사활동 증진: 올바르게 신체를 지지하여 호흡, 소화, 혈액순환 등 대사활동 증진
- 6) 조절성: 사용자의 신체 성장 및 변화에 맞게 각 구성품을 추가, 교체 가능
- 7) 경제성: 구성품별 별도 판매가 가능하여 효율적, 경제적 사용 가능

2. 사용 방법

- 1) 휠체어를 평편하게 펼친 후 골반유지도구를 연결고정부품을 이용하여 휠체어에 연결
- 2) 골반유지도구 위에 체간유지도구를 올리고 연결고정부품을 이용하여 휠체어 등받이 프레임과 고정(*이너 고정은 안전성과 직결되므로 확실히 고정되었는지 확인)
- 3) 기타 하지, 머리 유지도구 등을 연결
- 4) 대상자의 상체를 숙여 엉덩이가 체간 유지도구 하부에 밀착 되도록 착석시킨 후, 골반벨트를 착용
- 5) 골반의 안정성이 자세에 중요한 영향을 미치므로 골반벨트는 강하게 고정
- 6) 굽은 상체를 이완시키며 체간 유지도구에 밀착 되도록 상체를 펴고 부품들을 고정
- 7) 기타 발 벨트 등의 벨트류를 장착
- 8) 연결고정부품을 조절하여 각각의 구성품은 성장에 맞춰 높이/길이를 조절하여 사용
*모든 구성요소는 렌치 볼트를 이용하여 고정합니다.

[장애유형에 따른 Seating System 적용 예]



협약업소 정보

번호	업소명	주소	연락처
1	대명비엔앰	서울시 관악구 솔밭로 19-1(봉천동)	02-322-5088
2	모이텍	서울시 은평구 대조동 223-15 양지빌딩 6층	02-6337-5656
3	아이미르	서울시 송파구 가락동 가락대림아파트상가 203호	02-404-8322
4	유진헬스케어	서울시 성동구 성수동2가 275-28번지 202호	02-2236-6966
5	이원건강의료기수유점	서울시 강북구 수유동 521-49	02-992-2175
6	코지라이프서울	서울시 송파구 문정동 516번지 가든파크아파트 L-8011	1544-8972
7	100세동안 당산점	서울시 영등포구 양평로 85(양평동4가, 1층)	02-322-5088
8	건강한100세하남복지	대전광역시 유성구 봉명동 678-4 위드릭빌 101호	042-823-8321
9	이레앰케어	부산광역시 남구 대연동 1398-4	051-625-8589
10	코지라이프부산	부산시 연제구 연산동 1342-28 1층	051-866-2630
11	큰사랑홈케어	부산광역시 사상구 모라동 955-1 2층	051-314-7175
12	휴먼서버	부산광역시 사하구 사리로 28(괴정동)	051-291-2810
13	100세동안 계양점	인천광역시 계양구 작전동 852-32	032-548-1175
14	성도재활센터	광주광역시 남구 백운동 594-10 1층	062-675-2626
15	신세계보정기	광주광역시 서구 농성동 418-19(2층)	062-366-0445
16	미래메디칼	울산광역시 남구 신정3동 168-8	052-256-8593
17	건강의료기	강원도 홍천군 홍천읍 신장대리 55-43	033-433-2280
18	동방의료기	강원도 속초시 교동 658-46	033-631-2234
19	미래앰텍	강원도 원주시 명륜2동 821-11	033-764-6587
20	베스트메디스	경기도 시흥시 정왕동 1731-6(303호)	018-433-0226
21	코지라이프	경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 II 201호	1544-8972
22	이강아재활사	전라북도 전주시 덕진구 금암동 457-12	063-286-0122
23	제일의지보조기	전라남도 순천시 연향동 1348-3	061-727-5988
24	해남의료기보정기상사	전라남도 해남군 해남읍 고도리 401-45	061-536-5007
25	솔보조기	경북 포항시 북구 대흥동 619-50	054-281-1506
26	삼성메디	경상남도 김해시 삼정동 638-6	055-326-0969
27	성지보조기	경상남도 밀양시 삼문동 166-3	055-354-6691
28	엘플러스다솔	경상남도 김해시 위동 1207-8	055-336-4743
29	코지라이프경남	경상남도 김해시 삼정동 640-12	070-4406-2630
30	한신의료보조기	경남 창원시 마산합포구 중앙동3가 4-8	055-247-8183



<자세보조용구>

삼마메디칼



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 031)576-0373, [경기 남양주시 와부읍 월문리 1287-6]
2. E-mail : samma0373@naver.com

품 목 정보

품 목 1.

1. 품목 명 : 삼마 자세보조용구
2. 품목 타입 : 물당형

제품사양

- 제품 규격** : 맞춤형 자세보조용구
▶ 사용자의 신체와 변형에 맞게 제작 되어지는 맞춤형 삼마 자세보조용구입니다.
사용자의 변형 등 상태에 따라 1번 이상의 가동 과정을 거치게 되어 제작이 됩니다.
- 중 량** : 약 3~6Kg
▶ 맞춤형 자세보조용구로 대상자의 신체에 따라 규격이 달라지기 때문에 제품마다 중량의 차이가 있습니다.
- 재 질** : 합판 및 스펀지, 인조가죽
▶ 일반합판과, 강도가 서로 다른 스펀지, 제품을 씌우는 인조가죽으로 제작 됩니다.
- 보증 기간** : 무상1년(유상2년)
▶ A/S를 고려하여 부속품들을 3년 이상 보유하며 1년 무상 2년 유상 서비스를 실시합니다.
단, 출장이 필요한 경우 별도의 출장비가 청구 될 수 있습니다.



품 목 정보

<삼마메디칼>

제품 설명

1. 제품구성

- ▶ 삼마 자세보조용구(물당형)는

- 1) 등판
- 2) 좌판
- 3) Head Rest(머리받침)
- 4) Chest Rest(가슴벨트)
- 5) 골반벨트
- 6) 내전방지 붕
- 7) 발판

품목이 기본 구성품으로 제작되고 있습니다.



2. 부속품(구성부위별) 세부사항

- ▶ 삼마 자세보조용구(물당형)는 맞춤형 자세보조용구입니다.

- 1) 등판과 좌판 - 사용자가 착석하는데 있어서 필요하고 중요한 신체 부위를 찾아 강도가 서로 다른 스펀지를 이용하여 자세를 잡아줍니다.
- 2) Head Rest(머리받침) - 머리를 가누지 못하는 사용자가 옆으로 떨어지지 않도록 머리를 받쳐주며, 장기간 앉아 있는 사용자의 목과 머리에 부담을 덜어 줍니다.
- 3) Chest Rest(가슴벨트) - 가슴벨트는 사이즈 별로 제작되어지며, 가슴을 스펀지로 감싸주기 때문에 신체에 큰 부담이 없습니다.
- 4) 골반벨트, 내전방지 붕 - 사용자의 골반 및 하체가 앞으로 밀려 나오지 않고, 계속해서 올바른 자세가 유지 되도록 잡아 줍니다.
- 5) 발판 - 단단한 자작나무에 친환경 도료를 사용하여 제작 됩니다.

3. 사용방법

- ▶ Head Rest는 손잡이 볼트로 높이와 깊이 조절이 모두 가능합니다.
▶ 자세보조용구의 가슴벨트(Chest Rest)로 사용자의 성장에 따라 깊이 및 높이 조절을 할 수 있다.
▶ 좌판의 내전방지 붕은 깊이 조절이 가능합니다.
▶ 자세보조용구의 골반벨트는 찰찍이(벨크로)를 통해 깊이 조절이 가능합니다.
▶ 자세보조용구의 발판은 높이 및 깊이 조절이 가능합니다.
▶ 책상(램 보드)은 고정 벨트가 있어, 책상이 앞으로 밀려 나오는 현상을 방지 할 수 있습니다.

4. 주의사항 등 제품에 필요한 모든 내용.

- ▶ 자세보조용구가 장착되어 있는 필체어가 정지상태일 때에는 항상 바퀴를 잠금장치 하시기 바랍니다
▶ 자세보조용구의 소모품의 나가가 빠지거나 풀려 있을 경우에는 무리하게 사용하지 마시고, 교체 및 수리를 받으시기 바랍니다.
▶ 사용자가 장시간 앉아 있을 경우에 수시로 내려 휴식을 취하도록 합니다.
▶ 자세보조용구 이외의 용도로는 사용하지 마세요.

품목 2.

1. 품목 명 : 삼마 모듈형
2. 품목 타입 : 모듈형

제품사양

1. 제품 규격 : 맞춤형 자세보조용구
 - ▶ 사용자의 신체와 변형에 맞게 제작 되어지는 맞춤형 삼마 자세보조용구 입니다.
 - 사용자의 변형 등 상태에 따라 1번 이상의 가공 과정을 거치게 되어 제작이 됩니다.
2. 중 량 : 3.5~7Kg
 - ▶ 맞춤형 자세보조용구로 대상자의 신체에 따라 규격이 달라지기 때문에 제품마다 중량의 차이가 있습니다
3. 재 질 : 합판 및 스펀지, 인조가죽, 앵글
 - ▶ 일반합판과 스펀지, 제품을 씌우는 인조가죽으로 제작됩니다. 가슴 및 골반 패드는 스펀지와 앵글로 제작됩니다.
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)
 - ▶ A/S를 고려하여 부속품들을 3년 이상 보유하며 1년 무상 2년 유상 서비스를 실시합니다.
 - 단, 출장이 필요한 경우 별도의 출장비가 청구 될 수 있습니다.



제품 설명

1. 제품구성
 - ▶ 삼마 모듈형 자세보조용구는
 - 1) 등판
 - 2) 좌판
 - 3) Head Rest(머리받침)
 - 4) 가슴, 골반패드
 - 5) 골반벨트
 - 6) 내전방지 봉
 - 7) 무릎패드
 - 8) 발판
- 품목이 기본 구성품으로 제작되고 있습니다.



제품 설명

2. 부속품(구성부위별) 세부사항
 - ▶ 삼마 자세보조용구(물당형)는 맞춤형 자세보조용구입니다.
 - 1) 등판과 좌판 - 사용자가 착석하는데 있어서 필요하고 중요한 신체 부위를 찾아 강도가 서로 다른 스펀지를 이용하여 자세를 잡아줍니다.
 - 2) Head Rest(머리받침) - 머리를 가누지 못하는 사용자가 옆으로 떨어지지 않도록 머리를 받쳐주며, 장기간 앉아 있는 사용자의 목과 머리에 부담을 덜어 줍니다.
 - 3) 가슴패드 - 가슴을 지탱하는 부위에 스펀지를 사용하여 단단한 앵글에 스펀지를 중으로써, 옆으로 쓰러지는 이용자의 상체를 바로 잡아 줄 수 있습니다.
 - 4) 골반패드 - 골반이 틀리거나 쏠리는 현상을 막아주기에 바른 자세 앉기가 용이합니다.
 - 5) 골반벨트, 내전방지 봉 - 사용자의 골반 및 하체가 앞으로 밀려 나오지 않고, 계속해서 올바른 자세가 유지 되도록 잡아 줍니다.
 - 6) 발판 - 단단한 자작나무에 친환경 도료를 사용하여 제작 됩니다.
3. 사용방법
 - ▶ Head Rest는 손잡이 볼트로 높이와 깊이 조절이 모두 가능합니다.
 - ▶ 이너의 가슴패드는 사용자의 성장에 따라 깊이 및 폭과 높이 조절이 가능합니다.
 - ▶ 좌판의 내전방지 봉은 깊이 조절이 가능합니다.
 - ▶ 이너의 골반벨트는 쪽쪽이(벨크로)를 통해 깊이 조절이 가능합니다.
 - ▶ 자세보조용구(모듈러)의 발판은 높이 조절이 가능합니다.
 - ▶ 책상(랩 보드)은 고정 벨트가 있어, 책상이 앞으로 밀려 나오는 현상을 방지 할 수 있습니다.
4. 주의사항 등 제품에 필요한 모든 내용.
 - ▶ 자세보조용구가 장착되어 있는 휠체어가 정지상태일 때에는 항상 바퀴를 잠금장치 하시기 바랍니다.
 - ▶ 자세보조용구의 소모품의 나사가 빠지거나 풀려 있을 경우에는 무리하게 사용하지 마시고, 교체 및 수리를 받으시기 바랍니다.
 - ▶ 사용자가 장시간 앉아 있을 경우에 수시로 내려 휴식을 취하도록 합니다.
 - ▶ 자세보조용구 이외의 용도로는 사용하지 마세요.

협약업소 정보

번호	업소명	주소	연락처
1	한우리건강	대구광역시 달서구 용산로 123(감삼동 591-2)	053)551-7588
2	영원메디칼	경기도 시흥시 정왕동 1287-7 시화단지 3다 308호	1588-0844
3	아이앤유케어	서울 중구 신당동 247-8 태화빌딩	02)2233-7368
4	지오메디텍	대구광역시 서구 비산동 1336-4	053)353-7575
5	이케어	강동구 천호동 233-34 인성빌딩 502호	02)484-7988
6	아이미르	서울 송파구 가락동 70-19 대림상가 203호	02)404-8322
7	그린메디칼	서울 은평구 역촌동 54-8	02)354-6966
8	종료의료기	서울 도봉구 쌍운동 80-49	02)905-8024
9	코지라이프 부산	부산 연제구 연산5동 1342-28	051)866-2630
10	코지라이프 성남	경기도 성남시 중원구 상대원1동 138-1	1544-8972
11	코지라이프 경남	경남 김해시 삼정동 640-12	070-4406-2630
12	코지라이프	서울 송파구 중민로 66(문정동, 가든파이버라이프L)	1544-8972
13	삼성메디	경남 김해시 삼정동 638-6	055)326-0969
14	케어라이프코리아	서울 광진구 광장동 258-42 102호	02)455-0858
15	이지무브	경기도 안양시 만안구 안양 5동 621-4 현대빌딩 2층	031)689-3100



<자세보조용구> (주)위드알앤에이



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 041)583-3052~3 [충남 천안시 서북구 두정동 563-1]
2. E-mail : sonrna@hanmail.net

품목 정보

품목 1.

1. 품목 명 : 알앤에이 맞춤형 착석장치(R&A Special Seating Device)
2. 품목 타입 : 물당형

제품사양

1. 제품 규격 :
 - ▶ Client의 체형에 따라 개별 맞춤형으로 적용
2. 중 량 : 2kg내외
 - ▶ Base wood, Hard form, Soft form, 외피 및 벨트, Headrest 포함
3. 재 질 :
 - ▶ 우레탄(Hard&Soft form), 인조가죽 및 향균 에어매쉬, 유럽형 외피
4. 보증 기간 :
 - ▶ 무상1년(유상2년)



품목 정보

<위드알앤에이>


제품 설명

1. 이너 - 맞춤형 착석 장치 특징
 - ▶ 올바른 착석 자세를 유지 할 수 있도록 하는 맞춤형 자세보조용구
 - ▶ 장애 아동 및 청소년의 신체적 특징 및 변형(전만, 측만 후만)에 맞춤형으로 제작
 - ▶ 골반 자세 교정 및 안정성 확보를 통한 신체 기능향상
 - ▶ 고관절 탈구 예방 및 성장기 신체기능 향상 유도
 - ▶ 이동용 보조기구 및 실내용 보조기구와 호환 제작
 - ▶ 내분비계의 기능향상을 통한 신체 기능 향상
 - ▶ 호흡기능향상을 통한 언어 치료적 효과
 - ▶ 성장기에 따른 다기능적인 조절 가능

2.기능 설명

- ① 머리 받침대(Headrest)
 - ▶ 스스로 신체 조절 능력이 부족한 신체적 특징에 머리를 받쳐줌으로 올바른 자세가 유지 될 수 있도록 지지
 - ▶ 원시반사 등의 신경학적 반응에 있어 이상행동을 막아줌으로 인해 긴장감을 낮춰줌
- ② 어깨 벨트(Shoulder belt)
 - ▶ 체간과 머리 조절 능력이 부족하여 전방으로 떨어짐 현상이 있는 신체적 특징에 골반 및 가슴벨트와 함께 체간 및 어깨를 고정하여 안정적으로 체간을 유지할 수 있도록 하여 머리를 안정적인 위치에 유지.
 - ▶ 자세유지 및 기타 상지 활동에 원활한 움직임이 될 수 있도록 함.
- ③ 가슴 벨트(Chest belt)
 - ▶ 스스로 자세유지가 어려운 대상으로 하여금 상체를 안정적으로 자세유지 할 수 있도록 체간을 지지해 줌
 - ▶ 신체적 변형(전만, 측만, 후만)에 따라 3-Point 등 다양한 효과를 줄 수 있음.
 - ▶ 성별 및 신체적 상황에 따라 패드형, 조끼형, 일자형 등 다양하게 제공
- ④ 골반 벨트(Pelvic belt)
 - ▶ 가장 중요한 부위인 골반이 올바른 자세를 유지할 수 있도록 고정.
 - ▶ 골반의 변형에 따라 척추의 변형이 형성, 변형의 모양과 맞추어 다양하게 제작
 - ▶ 패드형, 4-Point, Y자형 등 변형에 의해 발생하는 전방 미끄러짐, 측방, 전방, 후방 굴곡 등의 변형에 따라 적절한 위치에 고정하여 골반을 안정적으로 유지 할 수 있도록 함.
- ⑤ Fommel
 - ▶ 뇌변형 및 뇌성마비 아동 특징 중 근육 단축으로 인한 비정상적 자세의 유발로 골반의 아탈구 및 탈구 유발
 - ▶ 비대칭적인 자세로 인한 안정적 공간의(BOS) 미확보로 자세유지에 어려운 부분을 Fommel을 통하여 외전을 유도함으로 아탈구 및 탈구의 개선 효과와 함께 안정적 공간의 (BOS)확보로 더욱더 안정적인 자세 유지 유도.
- ⑥ 머리 받침대 조절

머리받침대(Headrest)가 필요한 아동을 대상으로 머리를 지지하여 올바른 자세를 유지 할 수 있도록 도와주는 과정에 신체 규격 및 변형이 다양한 부분을 높낮이와 앞, 뒤를 조절 함으로 최상의 자세유지를 만들 수 있도록 함.

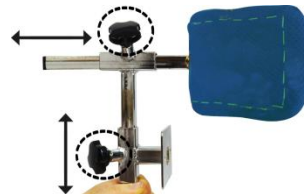


품목 2.

1. 품목 명 : 커들리(영문: cuddle)
2. 품목 타입 : 모듈형

제품사양

1. 제품 규격 :
 - ▶ 기본 320 ~ 420. 사용자의 성장에 따라 조절 가능
2. 중량 : 5Kg 내외
 - ▶ 옵션에 따라 중량이 틀리지며 Full Option 적용시 5kg
3. 재질 :
 - ▶ Form 및 외피 재질 : 우레탄(Hard&Soft form), 인조가죽 및 향균 에어매쉬, 유럽형 외피
 - ▶ 기본 Base 재질 : 알루미늄 절제 프레임
4. 보증 기간 :
 - ▶ 무상1년(유상2년)

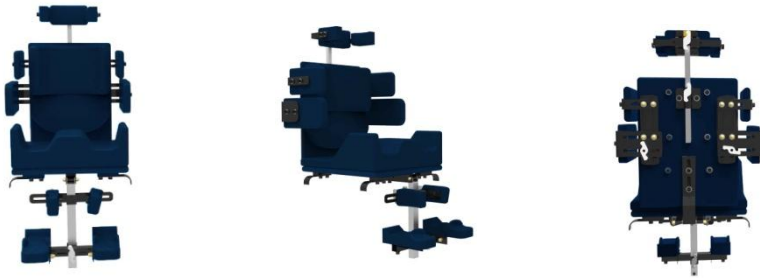

제품 설명

1. 용도

자세보조용구(좌석 장치)의 부속(부속품)을 모듈화하여 사용자의 체형에 따라 신체 일부 또는 전부 적용 가능하도록 제작되어진 자세보조용구로 사용자의 성장에 따른 모든 조절이 가능하며, 카시트 및 실내외에서 사용하는 Wheel base(휠체어 및 목재의자)와 호환이 가능하도록 제작된 것이 특징

제품 설명

2. 특징

- ▶ 사용자 상태에 맞게 조작이 용이(너비, 높이 등)
- ▶ 좌석과 등받이 힌지 조인트(hinge joint) 방식으로 리클라이닝 가능
- ▶ 골반 자세 교정을 통해 고관절 탈구의 예방
- ▶ 휠체어, 절제 프레임, 목재프레임에 호환 사용 가능
- ▶ 머리받침대, 좌석, 등받이, 발 받침 탈·부착 용이

3. 부분 설명




3-1. 두경부

- ▶ 사용자 신체 크기에 맞게 좌·우 폭 조절 가능
- ▶ 사용자 상태에 따른 다양한 형태의 머리받침대 적용 가능
- ▶ 노브를 이용해 앞·뒤, 높낮이 조절이 용이



3-2. 상지부

- ▶ 휠체어나 목재 제품에서 높이 치료할 때 책상 역할 대체
- ▶ 평상시에서는 램프에 팔을 올려 자세에 안정감 유지
- ▶ 어깨가 처지는 것을 방지

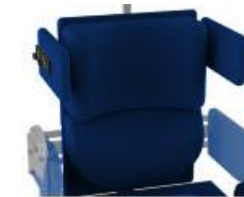

3-3. 체간부

- ▶ 체간 지지패드를 통해 체간부 안정성 증대(역좌 지점, 골반지점)
- ▶ 체간 지지패드를 통해 측만 변형 예방 및 교정 가능(3 점압 원리 적용가능)
- ▶ 요 천주 패드로 골반 후방경사, 척추 후만증 예방
- ▶ 레일 방식의 조절 시스템으로 조작이 용이
- ▶ 사용자 신체 상태에 맞게 상·하·좌·우 조절 가능
- ▶ 내전방지 폼멜(다리의 고 관절 변형을 방지)
- ▶ 내전방지 폼멜 쉬운 원 터치 탈·부착 가능
- ▶ 등받이 각도 조절 가능

제품 설명



3-4. 골반대퇴부

- ▶ 측면 골반 패드를 통해 골반의 abduction(외전) 방지
- ▶ 전체적인 골반의 안정성 제공
- ▶ 내전방지폼멜을 통해 골반의 adduction(내전) 방지
- ▶ 내전방지폼멜을 원 턱지로 탈부착 가능(아동 착석 시 편리성 증대)



3-5. 골반대퇴부

- ▶ 측면 골반 패드를 통해 골반의 abduction(외전) 방지
- ▶ 전체적인 골반의 안정성 제공
- ▶ 내전방지폼멜을 통해 골반의 adduction(내전) 방지
- ▶ 내전방지폼멜을 원 턱지로 탈부착 가능(아동 착석 시 편리성 증대)

협약업소 정보

번호	업소명	주소	연락처
1	영원메디칼	서울특별시 동작구 신대방동 395-62	02-835-2025
2	WithR&A 대전점	대전광역시 서구 갈마동 1322 101호	042-487-2374
3	토마토의료기	광주광역시 서구 마북동 157-9번지	062-447-4747
4	코지라이프 서울	서울특별시 송파구 중민로66 가든파이라이프 L-8007	1544-8972
5	코지라이프 부산	부산광역시 연제구 연산5동 1342-28	051-866-2630
6	코지라이프 성남	성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크2 제201호	1544-8972
7	코지라이프 경남	경남 김해시 삼정동 640-12	070-4406-2630
8	휴원트	대구광역시 북구 태전동 산7 대구보건대학B센터 5402호	053-324-2955
9	웰라이프	충청남도 천안시 동남구 봉명동 264 지하	041-575-5368
10	휴먼케어	충청북도 청원군 오창읍 창리 9-20 2층	043-212-9194
11	신제주노인방문요양센터	제주특별자치도 제주시 노형동 1433-5	064-747-3377
12	유진헬스케어	서울시 성동구 성수 2가 3동 275-28 201호	02-2236-6966
13	에스엠메디칼	서울특별시 양천구 신정동 902-5 수우빌딩4층 411	02-2692-9776
14	S&P Care	전안시서북구 부대동 산학협력관305호	1566-4895
15	아이미르	서울특별시 송파구 가락동 70-19 가락대림아파트상가 2층 3호	02-404-8322
16	성도 재활 센터	광주광역시 남구 백운동 594-10 1층	062-675-2626
17	경남 미래유텍(거제)	경상남도 거제시 고현동 729	055-636-5898
18	미래유텍(원주)	강원도 원주시 영륜동 821-11	033-764-6587
19	경남 미래유텍(창원)	경상남도 거제시 고현동 729	010-2988-220
20	인에이드	울산광역시 남구 봉월로 102번 길 23-2	052-261-9475
21	헨디케어	인천 부평구 십정동 578-5 동서빌딩 101호	032-513-8852
22	프로메드	부산 금정구 남산동 115-27	051-513-3301
23	씨티엘네트웍스	서울특별시 강남구 역삼동 641-2 한국콘텐츠진흥원빌딩 3층	02-2016-4025
24	씨티엘네트웍스(충남센터)	충남 천안시 서북구 성정9길 13,102(성정동)	010-3090-3204
25	대명비엔엠	서울특별시 관악구 봉천동 1683-1	02-597-8251
26	이지라이프	부산광역시 연제구 진남로 681(연산동)	010-9327-0260



<자세보조용구> (주)태산솔루션즈



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 031-720-5120~2 [경기 성남시 중원구 상대원동 5445]
2. E-mail : tsec@hanmail.net

품목 정보

품목 1.

1. 품목 명 : TS-INN100
2. 품목 타입 : 몰당형 자세보조용구

제품사양

1. 제품 규격 : 장애 아동 유형별 상태에 맞는 맞춤형
2. 중 량 : 2Kg 내외
3. 재 질 : 우레탄 소재(하드/소프트폼), 항균 에어매쉬
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)



품목 정보

<태산솔루션즈>

제품 설명



제품 설명

- 올바른 착석자세를 유지할 수 있도록 지지하는 맞춤형 자세유지기구
- 휠체어 및 실내용 의자에 호환가능
- 골반자세교정을 통해 고관절 탈구의 예방
- 척추변형 (전만, 후만, 측만)의 예방 및 교정
- 좌판, 등판 탈부착 용의
- 장애 아동 개인에 따른 맞춤형 제품

제품 구성

- 머리 받침대 (Headrest)
- 작업대 (Lap Board)
- 벨트류 : 가슴, 골반, 어깨, 발목벨트
- 내전방지 폼매
- 통풍시트 별도구매 가능

제품 규격

- 장애 아동 유형별 상태에 맞는 맞춤형

주의사항

- 충격이나 화기에 주의하시기 바랍니다.
- 송곳이나 뾰족한 물건을 갖다 되면 파손의 위험이 있사오니 주의 하시기 바랍니다.
- 착석 후 이동 시 안전벨트를 꼭 착용하십시오.
- 경사진 곳이나 바닥이 고르지 않은 곳에서는 착석하지 마십시오.



휠체어장착모습

제품 설명

인체 본뜨기 시스템 (TS-Shaper System)

테크니컬 에이드 (Technical Aid)

테크니컬 에이드란 장애인 각자의 요구를 만족시키는 기술 공학적으로 적절한 도구나 기기 즉, 편안한 자세로 앉아있기, 서있기, 이동 하기 등이 가능하도록 특수 제작된 의자, 휠체어, 스탠딩 테이블 등과 컴퓨터를 활용한 학습, 정보수집, 의사표현하기 등을 가능하게 하는 컴퓨터 보조 장치들을 포함한다


맞춤형 시트 제작 작업 과정



1. 인체본뜨기(TS-Shaper system) 작업 과정



[전동 휠체어 제작 적용사례]

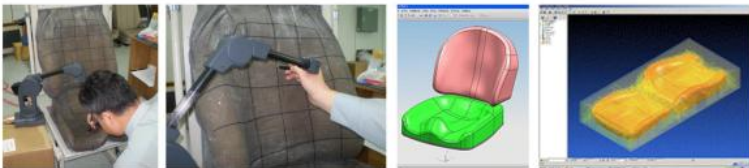

2. MicroScribe를 통한 형상 디지털 데이터 작업 과정



3. 의자 자동가공 및 봉제 작업 과정

협약업소 정보

번호	업소명	주 소	연락처
1	코지라이프 부산	부산광역시 연제구 연산동 1342-28 1층	051-866-2630
2	코지라이프 성남	경기도 성남시 중원구 상대원동 1281 1층	1544-8972
3	코지라이프 경남	경상남도 김해시 삼정동 640-12	070-4406-2360
4	코지라이프	경기도 성남시 중원구 상대원동 138-1 금강하이테크 2차 201호	1544-8972
5	포트	대구광역시 수성구 상동 497-7 2층	1566-6685
6	동부케어복지용구	경기도 오산시 궏동 67-4 안국상가 101	031-374-9858
7	동부케어(화성)	경기도 화성시 진안동 514-2 5층	031-225-7657
8	동부케어노인용품점	전라남도 광양시 중동 1827-14	070-4109-1463
9	신제주노인방문 요양센터	제주특별자치도 제주시 노형동 1433-5	064-747-3377
10	큰사랑 홈케어	부산광역시 사상구 모락동 955-1 2층	051-314-7175
11	엘플러스다솔	경상남도 김해시 외동 1207-8	055-336-4743
12	아이엔유케어 충북지점	충청북도 청주 흥덕구 비하로 18번길 10	1688-2273
13	아이엔유케어 충남지점	충청남도 아산시 삼동로 47-1	1688-2273
14	아이엔유케어 부산지점	부산광역시 서구 망양로 21번길 4	1688-2273
15	아이엔유케어 대전지점	대전광역시 중구 대전천서로 695	1688-2273
16	아이엔유케어 대구지점	대구광역시 수성구 동대구로 390 3호	1688-2273
17	아이엔유케어 광주지점	광주광역시 남구 오기원길 7-1	1688-2273
18	아이엔유케어 경남지점	경상남도 창원시 의창구 용지로 265번길 26	1688-2273
19	아이엔유케어 울산지점	울산광역시 동구 화정동 862-2	1688-2273
20	아이엔유케어	서울특별시 중구 퇴계로 382	1688-2273



<자세보조용구>

미 음 드 레



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 055-863-3440 [경남 남해군 고현면 남해대로 3406]
2. E-mail : miumdre@naver.com

품 목 정보

품 목 1.

1. 품목 명 : 인너 (In2010)
2. 품목 타입 : 물당형

제품사양

1. 제품 규격 :
 - ▶ 등판(평균) 400mm x 480mm / 좌판(평균) 400mm x 350mm
(사용자 저수에 맞춰 제작, 틀려 질 수 있음)
2. 중 량 :
 - ▶ 등판(평균) 4kg / 좌판(평균) 3kg
3. 재 질 :
 - ▶ 목재(러시아산 자작나무) / 메쉬 원단 / 카 레자 / 웨빙 50mm / 고급 버클
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)



품 목 정보

<미음드레>

제품 설명

- ◎ 대상
 - 불안정한 앉기 자세로 인해 지속적인 신체변형이 우려되는 장애 아동
- ◎ 제품 구성
 - 등판
 1. 머리 받침대
 2. 가슴 벨트
 3. 어깨 벨트
 - 좌판
 1. 골반 벨트
 2. 내전봉
- ◎ 특징점
 1. 신체변형 예방
 2. 생활 환경 개선 (이동성, 식사, 학습, 등)
 3. 시야 확보
 4. 소화, 배설 기능 향상
 5. 심폐 기능 향상
- ◎ 적용
 1. 휠체어
 2. 목재 의자
 3. 자동차 (카 시트)
 4. 학교 의자
 5. 좌식 의자
- ◎ 제작 과정
 1. 접수 및 상담
 2. 대상자 방문 및 평가
 3. 제작 계획
 4. 제작 실시
 5. 사용설명 및 납품
 6. 사후 관리
- ◎ 제작 기간
 - 접수일로 부터 최장 1개월

제품 설명

◎ 사용설명서

1. 인너를 기구(휠체어, 목재의자, 자동차등)에 부착한다.
인너 부착 방식은 이동기구의 패스너(벨크로)타입과 버클 타입이 있음.
2. 사용자 장착 시 방해가 되지 않도록 어깨벨트, 가슴벨트, 골반벨트를 적당한 위치에 풀어 놓는다.
3. 사용자를 인너에 앉힌다.
4. 엉덩이를 등판에 밀착시키고 골반벨트를 적당하게 조절한 후 버클을 ‘딸깍’ 소리가 나게 밀어서 고정시킨다.
5. 사용자의 상체를 등판에 밀착시킨 후 가슴벨트를 사용자의 맞게 조정하고 버클을 ‘딸깍’ 소리가 나게 밀어서 고정시킨다.
6. 머리 받침대는 상하 조절 손잡이를 느슨하게 하여 머리 위치에 맞게 적당히 조절 한다.
7. 어깨벨트 말단부의 양면 패스너(벨크로)를 가슴벨트 패스너(벨크로) 사이에 끼우고 어깨벨트를 사용자에게 맞게 적당히 조절한 후 버클이 ‘딸깍’ 소리가 나게 밀어서 고정시킨다.

◎ 주의사항

1. 사용자 임의로 분해하거나 구조변경 하지 마세요.
2. 제품 위에 물건을 올려 놓지 마세요.
3. 날카로운 물건으로 인한 원단이 찢길 수 있으니 주의하세요.
4. 다른 이동기구로의 이동 장착 시 고객센터로 문의 하세요.
5. 필요 이상의 열을 가하지 마세요. (탈색과 변형의 원인이 됩니다.)
6. 본 제품은 맞춤 제작한 것으로 사용자 외에 양도를 금합니다.
7. 교체 시기는 제작 후 보통 4~5년이나, 아이의 성장속도에 따라 차이가 생깁니다.
8. 이물질이 묻었을 경우, 젖은 부드러운 천으로 문질러 제거하세요.
9. 사용 중 이상 발생 시 사용을 중단 하고 고객센터로 문의 하세요.

협약업소 정보

번호	업소명	주소	연락처
1	혜성재활사	전남 순천시 장천동 56-13	061)741-8085



<자세보조용구>

(주)리컴메디칼



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 031-746-0576 [경기도 성남시 중원구 상대원동 146-8]
2. E-mail : leecome@naver.com

품 목 정보

품 목 1.

1. 품목 명 : J3 Back Set(구성: 두경부/J3 BACK HEADREST, 체간부/J3 BACK, 골반대퇴부/JAY ZIP CUSHION)
2. 품목 타입 : 모듈형

제품사양

1. 제품 규격: 두경부/J3 BACK HEADREST (패드사이즈: 14" ,10" ,8")
체간부/J3 BACK (좌폭x등높이x깊이): 14" x12" x3" 등 다양한 사이즈
골반대퇴부/JAY ZIP CUSHION (좌폭x깊이): 8" x8" 부터 16" x18" 까지 다양한 사이즈
2. 중 량 : 약 3kg
3. 재 질 : 두경부/J3 BACK HEADREST (폴리우레탄 폼, 네오프렌 패브릭)
체간부/J3 BACK (커버-폴리에스테르 메쉬원단, 나일론, 폼-폴리우레탄, 폴리에틸렌)
골반대퇴부/JAY ZIP CUSHION (내부폼-폴리우레탄, 내부커버-라이크라, 외부커버-나일론,합성고무)
4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)
▶ 내 용: 무상 1년 이후 유상 2년, 부속품 보존기간 3년



(J3 Back 세부사진)

품 목 정보

<리컴메디칼>

제품 설명


중증 장애인 및 뇌성마비 장애인이 사용하는 모듈형 자세보조용구로 제품의 구성은 두경부(제이쓰리 백 헤드레스트/J3 BACK HEADREST), 체간부(제이쓰리 백/J3 BACK), 골반대퇴부(제이 쥘 쿠션/JAY ZIP CUSHION) 등 전부 3가지가 셋트로 이루어져 있다.

1. 제품구성

- 1) 두경부(J3 BACK HEADREST)
①구조: 헤드레스트 패드, 헤드레스트 마운트와 브라켓
②패드사이즈: 14 " , 10 " , 8 "

2) 체간부(J3 BACK)

- ①구조: J3 BACK 커버, J3 BACK 폼, J3 BACK 쉘, J3 BACK 하드웨어

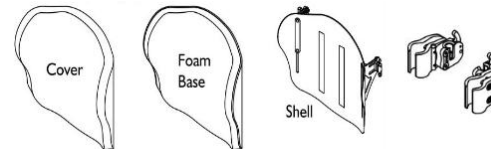

- ②사이즈(좌폭x등높이x깊이): 12" x8" x3" 부터 다양한 사이즈

3) 골반대퇴부(JAY ZIP CUSHION)

- ①구조: 내부폼, 내부커버, 외부커버
②사이즈(좌폭x깊이): 8" x8" 부터 16" x18" 까지 다양한 사이즈(높이:7cm로 동일)

2. 구성부위별 세부사항

- 1) 두경부(J3 BACK HEADREST)
J3 BACK HEADREST 패드 소재: 폴리우레탄 폼, 네오프렌 패브릭
HEADREST 마운트(헤드레스트 파이프) 및 브라켓 소재: 스틸과 알루미늄 압출

설명 : 중증장애인을 위한 머리받침으로 두경부의 자세가 흐트러지지 않도록 해주고 헤드레스트 패드를 통하여 두경부를 받쳐주는 기능을 한다.
J3 Back에 장착하여 사용가능하며 높낮이 조절 및 각도조절이 가능하고 미사용시에는 탈착이 가능하다.

2) 체간부(J3 BACK)

- J3 BACK 커버 소재: (앞면) 100% 폴리에스테르 메쉬 원단 (뒷면) 100% 나일론
J3 BACK 폼 소재: (앞면) 쿼트 레이어- 폴리우레탄 (뒷면) 써포트 사이드- 폴리에틸렌
J3 BACK 쉘 소재: H32 temper와 알루미늄 합금
J3 BACK 하드웨어 소재: 냉연 강판, 압출 알루미늄, 플라스틱 사출 성형 나일론, 스틸 잠금장치

설명 : 중증 장애인들의 흐트러진 체간부(허리부분)의 자세를 바로 잡아주는 기능을 한다.
알루미늄 합금 소재로 제작된 쉘부분이 견고한 지지역할을 만들어 주기 때문에 장시간 사용하셔도 무리가 없고 척추 측만증 예방효과가 있고 자세 보정 효과가 탁월하다.

3) 골반대퇴부(JAY ZIP CUSHION)

- 내부 폼 소재: 폴리우레탄 100%, 더블 레이어 컨투어 폼(double layer contoured foam)
내부커버 소재: 폴리우레탄 코팅된 라이크라
외부커버 소재: 나일론 34%, 네오프렌 32%, 합성 고무 34%


설명 : 쿠션 내부폼이 부드러운 폴리우레탄 소재로 제작되어 장시간 사용을 하여도 착석감이 뛰어나다.
커버가 이중커버로 되어있어 실금방지에도 효과가 있다.

제품 설명


3. 사용방법

1) 제간부(J3 BACK)

- ① 육각렌지(4mm)와 스패너(10mm) 등의 도구를 준비한다(제품에 포함되어 있음)
- ② J3 BACK을 장착하기 전에 먼저 필체에 달려있는 등시트를 제거한다.
- ③ 필체어 등파이프 부분에 설치할 장소의 높이를 결정한다. 하드웨어는 각각의 등파이프에 같은 높이로 장착하여야 하고 시트 프레임과는 평행으로 설치되어야 한다.
- ④ 하드웨어 리시버를 장착한다.
 - 육각렌지(4mm)로 클램프 나사를 푼다(A)
 - 필체어 등파이프에 리시버를 장착한다(B)
 - 클램프 나사를 꼭 조인다.

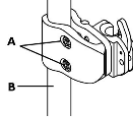

⑤ 부착하기

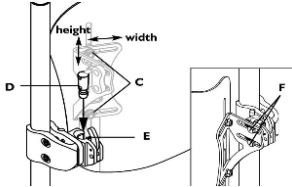

- 하드웨어가 모든 방향에서 쉽게 이동할 수 있도록 스패너(10mm)를 사용하여 브라켓 너트(C)와 장착 핀 볼트(F)를 느슨하게 조절해준다.
- 좌우 리시버(E)에 좌우 장착 핀(D)을 삽입하여 하드웨어 리시버에 J3 Back을 장착한다.
- 장착 핀(F)의 안쪽에 볼트를 조인다.
- 브라켓 너트(C)를 조인다.
- 릴리스 레버를 누르고 필체어에 J3 Back을 제거하여 탈부착을 테스트한다.

2) 두경부(J3 BACK HEADREST))

- ① J3 BACK의 옆 뒷면 상단부분에 헤드레스트 브라켓을 장착한다.
- ② 마운트(헤드레스트 파이프)를 브라켓에 끼운 후 단단히 조인다.
- ③ 사용자에게 머리위위에 맞게 각도와 위치를 조정한다.

3) 골반대퇴부(JAY ZIP CUSHION)

- ① 쿠션의 앞뒤를 구분하여 필체어의 좌석시트 위에 쿠션을 배치한다.
- ② 올바른 쿠션의 착석은 엉덩이가 필체어 뒤쪽에 있어야 한다.

4. 주의사항

- 1) 새로운 쿠션을 사용하기 전에 피부에 빨간 반점이 나타나는지 확인해야 한다. 만약 피부에 빨간 반점이 나타나면 즉시 쿠션 사용을 중단하고 의사 또는 치료사에게 검사를 받고 나서 이후 사용하는 것이 필요하다.
- 2) 날카로운 물체 또는 과도한 열을 피해야 한다.
- 3) 쿠션의 압수 벨크로는 지속적으로 습기에 접촉을 하면 품질이 저하될 수 있다.
- 4) 쿠션 커버를 끼울 때 제품의 방향을 맞춰 쿠션커버와 사용해야 한다. 커버를 올바르게 사용하지 않을 경우 커버의 장점이 줄어들고 피부와 연조직에 위험을 증가시킬 수 있다.
- 5) 필체어에 등받이(J3 BACK)를 설치하면 필체어의 무게 중심에 영향을 미칠 수 있으므로 보조바퀴의 장치이나 축 조절을 임의로 하면 안된다.
- 6) 필체어를 밀거나 들어 올릴 때에는 J3 BACK을 사용하지 말아야 한다. 부적절하게 사용할 경우 필체어와 등받이가 분리될 수 있다.

협약업소 정보

번호	업소명	주소	연락처
1	힐스코리아	경기 광주시 장지동 354 솔향기 예아-101	031)746-0581



<자세보조용구>

(주)오토복코리아헬스케어



연 락 처

1. 고객센터(Tel) : 02-6206-7798 [서울시 서초구 서초동 1357-74]
2. E-mail : Hanah.Kim@ottobock.com

품 목 정보

품 목 1.

1. 품목 명 : 마이고 (Mygo)
2. 품목 타입 : 모듈형

제품사양

1. 제품 규격 :

	의자높이	의자넓이	의자깊이	등받이높이	종아리길이	무릎넓이	몸통넓이	팔걸이높이
사이즈1	36-70cm	20-32.5cm	27-42cm	36-47cm	21.5-35cm	9-11cm	17-27cm	16-21cm
사이즈2	36-70cm	22-34.5cm	35-47cm	46-57cm	31.5-47cm	12-14cm	17-27cm	21-26cm

2. 중 량 :

사이즈1	10Kg
사이즈2	14.5Kg

3. 재 질 :

*프레임부분 : 알루미늄, 스틸 / *시트부분 : 스펀지, 천 / *기타부분 : 플라스틱, 고무

4. 보증 기간 : 무상1년(유상2년)

제품은 1년 이내의 자체 결함 시 무상 및 향후 2년은 유상으로 A/S 받으실 수 있습니다.

•단, 1. 팔받이, 시트 등 소모품 / 2. 자연재해, 부적절한 관리로 인한 제품 손상 / 3. 사용설명서에 의하지 않은 부적절한 사용 및 수리로 인한 제품손상 에 대해서는 무상A/S 에서 제외 됩니다.



품 목 정보

<오토복코리아>

제품 설명


ottobock.

mygo 마이고 (Mygo)는


각 부위별로 조절이 가능하며 3세부터 14세까지의 아동에게 최적의 안정도를 제공합니다. 또한, 아동이 최대한 자유롭게 움직일 수 있도록 하기 위하여 기존의 기능들과 움직임을 도와줍니다. 다양한 범위의 액세서리 덕분에 아동의 니즈에 맞게 사용을 할 수 있습니다. 그리고 사이즈 조절이 가능하기 때문에 아동이 성장하여도 사용할 수 있습니다.

1. 인지 발달과 신체 발달에 초점을 둔 치료용의자
2. 머리,몸통,골반,다리,발의 견고한 지지 통한 안정감제공
3. 틸팅,리클라이닝 기능 가능
4. 부분별 높낮이, 폭, 각도 조절가능
5. 시트 높낮이 조절을 통한 활동영역과 넓은 시야 확보
6. 실내,외 사용


포지셔닝 옵션

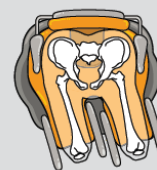


원드스위핑

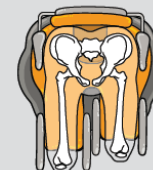

다리길이 차이

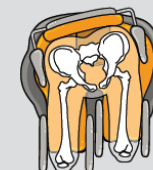

골반뒤틀림

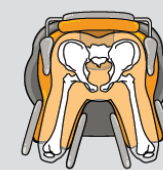

어브덕션

액세서리

- 세탁이 가능한 네 가지의 색상의 쿠션 (분홍, 파랑, 회색, 오렌지)
- 팔걸이
- 트레이와 패딩
- 손잡이
- 발판과 발걸이
- 무릎 패드
- 무릎 벨트, 흉골 벨트, 흉관 벨트
- 골반 쿠션과 보정 쿠션
- 측면 지지대
- 측면지지대가 있는 헤드레스트

